

**СуперОптік™ Компліт**  
краплі очні  
**Інструкція із застосування**  
Медичний виріб

**Склад:**

**10 мл розчину містять:**

натрію гіалуронат 0,15 %, декспантенол 2 %, натрію хлорид, натрію цитрат дигідрат, лимонної кислоти моногідрат, вода очищена.

Без консервантів

Без фосфатів

**ОПИС:** стерильний, ізотонічний, прозорий, безбарвний і в'язкий розчин.

**Властивості:**

Завдяки комбінації діючих речовин СуперОптік™ Компліт має потрійний ефект.

Натрію гіалуронат зволожує і стабілізує слізну плівку. Гіалуронова кислота входить до складу медичного виробу у вигляді натрію гіалуронату, має хімічну структуру, молекулярну масу та реологічні властивості, подібні до муцину (компоненту людських сліз). Завдяки своїм властивостям гіалуронова кислота зволожує око, не погіршуючи зір. Крім того, її здатність зв'язувати воду дозволяє зберігати поверхню ока вологою, а також зменшує випаровування сліз з поверхні ока. Натрію гіалуронат не абсорбується після місцевого застосування.

Декспантенол заспокоює, захищає і відновлює поверхню ока, створюючи на рогівці ока стерильний, прозорий захисний шар. Декспантенол – похідне д-пантотенової кислоти, яка є водорозчинним вітаміном групи В (провітамін В5).

Збільшена потреба цієї кислоти в пошкодженій слизовій оболонці та її можливий дефіцит може бути компенсований за допомогою місцевого застосування декспантенолу. Завдяки своїм протизапальним та протисвербіжним властивостям, а також здатності прискорювати грануляцію та реепітелізацію, декспантенол сприяє загоєнню запалення очей небактеріального генезу. Декспантенол посилює вологоутримуючі властивості натрію гіалуронату.

Застосування крапель СуперОптік™ Компліт сприяє швидкому усуненню дискомфортних симптомів, спричинених сухістю очей. Регулярне використання сприяє запобіганню можливих ускладнень.

СуперОптік™ Компліт, краплі очні, використовуються для зволоження, регенерації і захисту поверхні ока.

**Показання для застосування:**

СуперОптік™ Компліт чинить зволожувальну, заспокійливу та захисну дію, сприяючи регенерації поверхні ока.

СуперОптік™ Компліт замінює природну сльозу для вирішення проблеми сухості очей (синдром «сухих очей») різного ступеня в разі недостатньої секреції сльози або змін її складу.

Застосування очних крапель СуперОптік™ Компліт забезпечує інтенсивний догляд і захист:

- проти сухості і механічних подразнень через зовнішні умови: вітер, сухе повітря, пил, дим, забруднене повітря, кондиціонування повітря, неонове світло.
- при діагностичних або хірургічних втручаннях на очах, при наявності сторонніх предметів в оці.
- при напрузі, втомі та подразненні очей через відсутність моргання під час тривалих періодів зосередженого перегляду цифрових екранів, тривалої роботи за комп'ютером, водіння, точної роботи.
- під час використання лікарських засобів, які можуть спричиняти сухість та подразнення (для лікування депресії, гіпертонії, для запобігання вагітності, застосуванні очних деконгестантів) та при деяких захворюваннях або станах які можуть викликати сухість та

дискомфорт в очах (ревматоїдному артриті, діабеті, астмі, проблемах зі щитовидною залозою, глаукомі, гормональних змінах у жінок під час вагітності, годуванні груддю, менопаузи, вікових змінах).

- під час носіння контактних лінз.
- старіння (від синдрому сухого ока страждає 75 % населення віком від 65 років)

### **Попередження і запобіжні заходи:**

Не застосовуйте СуперОптік™ Компліт:

- у разі підвищеної чутливості (алергії) до гіалуронату натрію, декспантенолу або до будь-якого іншого інгредієнта СуперОптік™ Компліт, краплі очні.
- У разі появи алергічної реакції негайно припиніть застосовування препарату та зверніться до лікаря.

### **Інше:**

- Помітивши пошкодження флакона чи дозатора не застосовуйте медичний виріб.
- Для безпечного застосування та гігієни кожен флакон повинен застосовуватися лише однією людиною.
- Про взаємодії між краплями СуперОптік™ Компліт і розчинами для контактних лінз, іншими очними краплями або очними мазями для місцевого застосування не повідомлялося. Якщо ви використовуєте інший засіб для очей, застосовуйте їх з інтервалом не менше 15 хвилин.
- Одразу після застосування крапель ваш зір може бути затуманений на дуже короткий період часу. Тому бажано утриматися від керування автомобілем, іншими транспортними засобами чи механізмами та дочекатися відновлення гостроти зору.

### **Безпека:**

СуперОптік™ Компліт не містить консервантів і фосфатів, що зменшує можливість подразнення та пошкодження поверхні ока.

Технологія крапельниці включає фільтр, який робить медичний виріб безпечним для використання, оскільки запобігає забрудненню очних крапель і зберігає стерильність вмісту навіть через 6 місяців після відкриття.

Медичний виріб зазвичай добре переноситься. Однак, якщо ви помітили будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або фармацевта.

### **Спосіб застосування:**

Завжди застосовуйте СуперОптік™ Компліт відповідно до цієї інструкції із застосування. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем або фармацевтом у разі будь-яких сумнівів щодо застосування СуперОптік™ Компліт.

Якщо не призначено інше, закапуйте по 1–2 краплі в кожне око кілька разів на добу за потреби.

Кілька разів моргніть, щоб рівномірно розподілити краплі по поверхні ока.

Підходить для тривалого використання.

**Уникайте контакту кінчика крапельниці з поверхнею ока чи будь-якою іншою поверхнею.**

Перед першим застосуванням флакон потрібно активувати. Для цього зніміть пробку з помпи, переверніть флакон догори дном і **кілька разів натисніть аплікатор до появи першої краплі.**

### **Інформація для користувачів контактних лінз**


СуперОптік™ Компліт сумісний з усіма видами контактних лінз і може надавати відчуття комфорту при носінні контактних лінз. Не вимагає зняття контактних лінз.

### **Інструкція для застосування**

1. Ретельно вимийте руки.
2. Зніміть ковпачок з помпи (зображення 1).
3. Візьміть помпу рукою, як показано на зображенні 2.
4. Переверніть флакон догори дном і натискайте на аплікатор, поки не з'явиться перша крапля засобу (зображення 3).

5. Нахиливши назад голову, обережно закапайте 1-2 краплі в око (зображення 4).

6. Встановіть ковпачок на помпу.

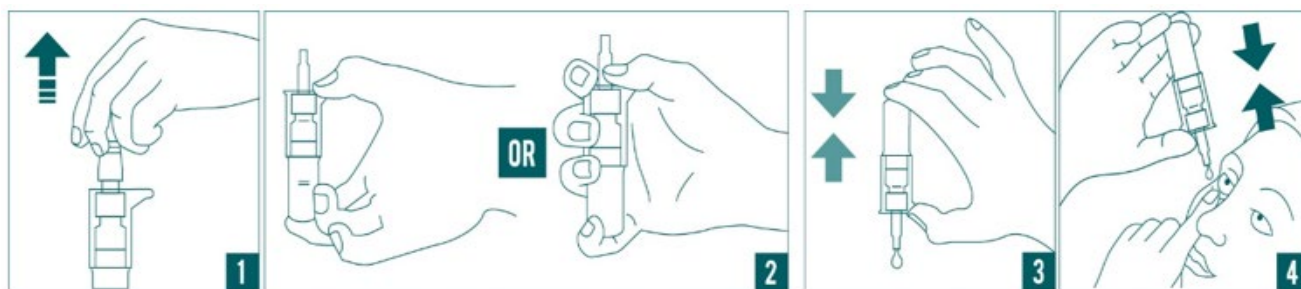

**Виробник:**

ДЖАДРАН - ГАЛЕНСЬКІ ЛАБОРАТОРІЙ д.д.  
Свілно 20, 51000 Ріджека, Хорватія

**Дистриб'ютор:**



Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А.  
вул. Пельплиньска 19, 83-200, Старогард Гданьски, Республіка Польща

**Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:**

ТОВ «ПОЛЬФАРМА ЮА», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, вхід 11, Україна  
Ел. пошта: [info.ukraine@polpharma.com](mailto:info.ukraine@polpharma.com)  
Тел.: (044) 498-90-07

**Термін придатності:**

Зазначено на упаковці. Термін придатності після відкриття флакона — 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

**Умови зберігання:**

Не потребує особливих умов зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка:**

По 10 мл (ml) у флаконі. По 1 флакону з інструкцією із застосування у картонній коробці.

**Дата останнього перегляду:** 05.2025.

**Символи нанесені на пакуванні:**

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | стерильно, асептичний метод обробки                                                                |
|  | ознайомитися з інструкцією із застосування                                                         |
|  | Увага! Ознайомитися із інструкцією із застосування (розділи щодо попереджень і запобіжних заходів) |
|  | медичний виріб                                                                                     |
|  | термін придатності                                                                                 |
|  | виробник                                                                                           |



серійний номер



символ відповідності технічним  
регламентам

UA.TR.126

ідентифікаційний номер органу з оцінки  
відповідності



для багаторазового застосування лише  
однією особою



не використовувати пошкоджений виріб